

Amniopick



BESCHREIBUNG

Zur atraumatischen Perforation der Fruchtblase

Amniopick ist 25 cm lang, leicht gebogen, distal abgerundet und passt sich ideal der normalen Beckenkrümmung an.

Der Widerhaken ist so zugespitzt, dass es beim Einführen zu keiner Verletzung des umliegenden Gewebes kommt.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Amniopick wird wie ein Messer mit ausgestrecktem Zeigefinger gehalten, wobei der Widerhaken in Richtung des Fingers zeigt und die Fingerkuppe 1 cm über das distale Ende der Vorrichtung herausragt.

Führen Sie Amniopick wie oben beschrieben in die Vagina ein und platzieren Sie das Instrument an die untere Seite der Fruchtblase.

Amniopick wird nun angehoben und in die Fruchtblase gedrückt.

Mit einer entgegengesetzten Bewegung ritzt man die Fruchtblase an, wodurch sie gesprengt wird: das Fruchtwasser kann nun frei abfließen.

Entfernen Sie Amniopick und werfen Sie es.