

Hysterometer



BESCHREIBUNG

Kunststoffstäbchen (29 cm lang) zur Bestimmung der Uteruslänge.

Distal über eine Länge von 15 cm mit jeweils einem Abstand von 1 cm mit schwarzen Markierungen versehen.

In drei Größen lieferbar: CH10, CH12, CH14

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Vor dem Einführen können Sie den Hysterometer krümmen.

Führen Sie den Hysterometer sanft durch die Zervix bis zum Uterusfundus ein und lesen Sie anhand der Markierungen auf dem Hysterometer die Uteruslänge ab.

GEGENANZEIGEN: Allgemeine Infektion des Genitalbereichs, Schwangerschaft

1502S10	Hysterometer CH10		
1502S12	Hysterometer CH12	ESV	VE à 25 Stück
1502S14	Hysterometer CH14		