

Retrievette



BESCHREIBUNG

Retrievette ermöglicht die Fäden oder den Stamm eines Intrauterin-Pessars zu erfassen, um es zu entfernen.

Retrievette besteht aus einer weißen Vorrichtung aus Plastik mit abgerundetem Ende und ist mit drei Widerhaken ausgestattet, die auf dem konkaven Teil des zentralen Stammes verteilt wurden.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Platzieren Sie ein Spekulum und reinigen Sie die Zervix.

Erfassen Sie den Uterushals mit einer Zange und führen Sie das abgerundete Ende der Retrievette durch den Zervixkanal bis zum Gebärmuttergrund ein.

Drehen Sie nun unter Ausübung eines sanften Drucks gegen die Uteruswand die Retrievette um 180° im Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie die Retrievette mit der konkaven Seite zur Gebärmutterwand zeigend heraus. Die Widerhaken erfassen den Faden und ziehen ihn in Richtung der externen Mündung der Zervix.

Sollte der erste Versuch erfolglos bleiben, wiederholen Sie die Prozedur, drehen aber die Retrievette diesmal gegen den Uhrzeigersinn.

GEGENANZEIGEN: Allgemeine Infektion des Genitalbereichs

1504000

Retrievette

ESV

VE à 10 Stück